

UPR-300 输液控制器操作指南


操作三部曲：


1. 开机前正确安装输液管
2. 开机并打开输液管人工控制阀
3. 设置相应“速度”，启动运行。

具体操作如下：

一、安装：

1. 排空输液管、关注墨菲氏管液面。
2. 将墨菲氏管卡入控制器的上卡槽（管内药液应保持在红外线检测部位以下），再把输液管卡入底部阀门和下卡槽处。（如图 1）

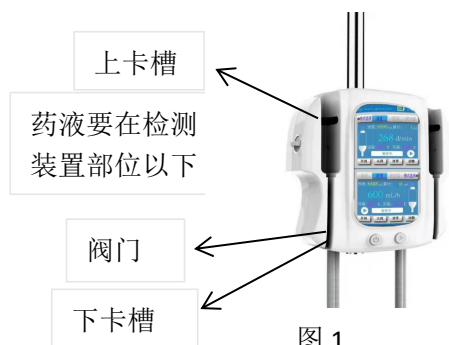

二、开机：按“”键开机。

三、设置输液速度：

(1)、待机状态下，轻触左（或右）通道“200 d/min”位置的数字，键盘出现显示屏上。


(2)、再输入要设置的速度数字，如图 2 所示。

四、设置加温温度：


(1)、待机状态下，轻触左（或右）通道“设温：38.0℃”位置的数字，键盘出现显示屏上。

(2)、输入要设置的加温温度，注意小数点位置，如图 3 所示。



五、输液：打开输液器的滚动夹，按“”开始输液。

一键转换功能：

长按“”键 3 秒一键转换至纯加温模式并开始运行。如图 4。

注意事项

1. 严格按照要求调整好滴壶液面。
2. 换瓶时，注意排空滴壶上端管路空气并保持液面高度。
3. 全程保持输液管路通畅。
4. 注意设置的速度应小于管路全开放时的速度。
5. 机器报警时按“清报警”键。
6. 累计清零按“清零”键。



详情请参考说明书

网 址：www.up-real.com 电话：020-82113310